

*Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el!*

### ***Kedves Vásárlónk!***

*Az Önnek szállított e.b. fusselastik 2 részből áll: egy villás szerkezetű, rugalmas nemesacél talpbetétből, valamint egy bársonyos puhaságú, cserélhető masszázspárnából (szürke vagy bordó). A két fél tökéletes összhangja pihentetővé teszi a járást. A rugalmas talpbetét jótékony hatással van a közérzetre.*

*Az e.b. fusselastik talpbetétet német precizitással, személyre szabottan, kizárólag az Ön lábához és testsúlyához igazítva készítettük, hogy hatásosan tehermentesítse lábát.*

*Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és fogadja meg a leírtakat, hogy a kívánt hatást elérve hosszú ideig örömet lelhesse az e.b. fusselastik talpbetétben!*

*Lelje örömet az e.b. fusselastik talpbetétben!  
e.b. fusselastik – Vevőszolgálat*

## **Hogyan helyezzük az e.b. fusselasticot a cipőbe?**

A talpbetét végét (a nem párnázott, fémrészt) a sarkunk alá, a cipő sarkához kell helyezni! A masszázspárna a **talppárnák** felé nézzen! A talpbetét, cipőtől függően, 1-2 cm-t előre eltolódhat járás közben. Ez az adott cipő egyedi kialakításától is függ.





## **Hogyan különböztethető meg a jobb és a bal lábhoz tartozó, kétféle talpbetét?**

A jobb lábhoz tartozó talpbetét alsó részén egy „R”, míg a bal lábhoz tartozón egy „L” betű olvasható. A talpbetét alján lévő számok nem a cipőméretre utalnak! Ezek a gyártó számára szolgálnak információval.

## **Hogyan különböztethető meg a masszázspárna alsó és felső része?**

A talpbetét felső részét a világos (szürke) vagy sötét (bordó) színről ismerheti fel. Az alsó rész a világos masszázspárna esetén laposabb, a sötét pedig párnásabb.

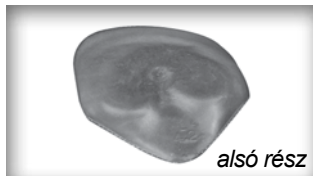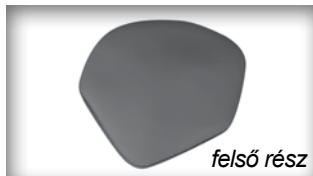

## **Miért van két különböző masszázspárna?**

Az Ön személyes igényeihez igazítva két különböző masszázspárnát kínálunk, melyeket színük alapján könnyedén megkülönböztethet.

- A világos masszázspárnákat a szoktató időszakban vagy szűk cipőkhöz kell viselni.
- A sötét masszázspárnákat széles cipőkhöz ajánljuk, különösen, ha a lábfejen erősen igénybe vett nyomópontok vannak.

## **A masszázspárnák cseréje gyerekjáték**

1. Levételnél fogja meg a masszázspárnát a közepén (hüvelykujj felül), és gyengéden húzza le a párnácskát a talpbetétről! Még véletlenül se kezdje el feltépni a talpbetétről!



2. Felhelyezésnél fogja meg a párnácskát a közepén, kicsit nyomja össze, és húzza rá a talpbetétre!



## **Érezhető masszázs, kényelmes alátámasztás**

*Miután a cipőjébe helyezte a talpbetétet, álljon fel, és helyezze testsúlyát egyik lábáról a másikra! A kellemes párnázottság mellett enyhe nyomást érezhet a lábfej közepén. Ez az enyhe nyomás a talpbetét használata közben rövid idő után elmúlik, és helyébe kellemes, lazító masszázsrészlet lép. Lába gyorsan hozzászokik a természetes körülményekhez. A talpbetét használatakor kezdetben némi izomláz és/vagy fáradékonyság jelentkezhet. Ezen átmeneti időszak megkönnyítésére ajánlatos az első napon csak kb. 1 órát hordani, majd fokozatosan mindennap emelni 1 órával ezt az időtartamot. 1-1,5 hét múlva már egész nap hordhatja a talpbetétet. A közérzet javulása már 3-4 hét után jelentkezik.*

## **Miért készül nemesacélból a rugalmas talpbetét?**

*A kitűnő minőségű nemesacél egyedülálló mechanikai tulajdonságai teszik lehetővé, hogy a talpbetét bármilyen cipőben hordható legyen, lábát tehermentesítse, ezzel együtt puhává varázsolja a járást. Az ívelt kialakítás biztosítja a kellő rugalmasságot, amely a hárompontos alátámasztás és a masszázs feltétele.*



fuss

### **Mit mozgat meg az e.b. fusselactic?**

*Az e.b. fusselactic rugalmasan alátámasztja, megmozgatja, erősíti az inakat, ínszalagokat és az izomzatot, masszírozza az érzékeny párnát, serkenti a véráramlást, állandó hárompontos alátámasztást biztosít, tehermentesíti lábát, és megkíméli az egyoldalú terheléstől. Az e.b. fusselactic nem kemény és merev talpbetét, hanem rugalmas közvetítő a láb és a kemény talaj között, ezzel nyújtva lábának rugalmas, természetes és nélkülözhetetlen alátámasztást.*

### **Mikor forduljon hozzánk segítségért?**

*Ha a talpbetét 3-4 hetes használat után sem nyújtana kellemes, jó közérzetet, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk! Biztosíthatjuk, hogy végül elégedett lesz! Kérjen tőlünk ingyenes előnyomatot, amelyen bejelölheti, hogy hol nyomja a cipője. Az Ön által megadott adatok alapján megvizsgáljuk az e.b. fusselactic talpbetétét, és felmérjük, hogy szükséges-e utóvizsgálat, vagy más módon is megoldható-e a probléma. Az első három hónapban ez a szolgáltatás díjmentes, később a vizsgálatért szervizdíjat számolunk fel.*

## **Fontos szabály új cipő vásárlásakor!**

**1. Feltétlenül vigye magával az e.b. fusselastíc talpbe-tétet!**

**2. A kiválasztott cipőt először talpbe-tét nélkül, majd talp-be-téttel próbálja fel! Csak akkor vegye meg a cipőt, ha mindkét esetben kényelmesen illeszkedik a lábára!**

**3. Legyen szó akár alkalmi vagy sportcipőről, otthoni, munka-, túralábbeliről, csizmáról vagy nyitott lábbeliről, minden esetben válasszon puha, természetes bőrből készült típust, hiszen a láb ebben érzi igazán jól magát, és a talpbe-tét is ilyen lábbeliben fejt ki a legjobb hatást.**

**4. Figyeljen arra, hogy semmilyen varrás vagy pánt ne nyomja össze lábfejét, mert ez gátolja az e.b. fusselastíc talpbe-tét hatását!**

**5. A cipő sarkának szorosan körül kell ölelnie a sarkát, hogy a láb a cipőben ne lötyögjön! Ha a cipő és a cipősarok túl nagy, az nem képes megfelelően tartani a lábat! Mindig a lábméretnek pontosan megfelelő cipőt válasszon: ne legyen se túl kicsi, se túl nagy a lábbeli!**

**6. Ha teheti, válasszon laposabb sarkú cipőt, mivel az 5 centiméternél magasabb sarok fokozottan terheli a lábat, és ebben az esetben az e.b. fusselastíc sem tudja megfelelően kifejteni pozitív hatását.**

**7. Új cipőt délután próbáljon, mert a láb napközben kicsit megdagadhat!**

## **Mire ügyeljünk még használatban lévő cipő esetén?**

Az e.b. fusselastik kiválóan illeszkedik a normálkialakítású, lábméretének megfelelő cipőkbe. Az érzékeny lábú emberek gyakran valós lábméretüknél 1 számmal nagyobb cipőt hordanak. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy a cipő „klaffog” a fentebb említett okok miatt (5. pont). Annak érdekében, hogy ilyen esetben se kelljen lemondania az e.b. fusselastik előnyeiről, azt tanácsoljuk, hogy cipészével varrassa bele cipőjébe a sarokpárnát!

## **Hogyan rögzítsük a ragasztási pontokat a cipőbe?**

(különös tekintettel a nyitott cipőkre)

Egy csomag ragasztó nyolc egységből áll: hat fehér (a cipőhöz) és két durva, sötét (a talpbetéthez). Első lépésben alkoholos vattával tisztítsa meg a talpbetétet hátul az alsó részén! Ezután húzza le a fóliát a sötét ragasztótappancsról, és ragassza fel a talpbetét aljára (sarokrész)! A fehér tappancsokat ragassza a cipő sarokrészére! **A ragasztást 24 órán át hagyja száradni!** Tegye a talpbetétet a cipőjébe! Ezzel megakadályozza, hogy az előrecsússzon. Ha egyik cipőből a másikba szeretné áthelyezni a talpbetétet, akkor mutatóujjával tartsa feszesen a belső talpat (a sarokrész, a cipő és az elasztikus rész között)! A kis ragasztótappancsok mind a cipőben, mind az e.b. fusselastik talpbetéten fenn maradnak.

# Világszerte egyedülálló!

## **5 év garancia a talpbetétre!**

*A talpbetét anyaga a legjobb minőségű, speciális svéd-acél. Garantáljuk tartósságát, mert tudjuk, hogy a jó minőségű, edzett acél élettartama a 10 évet is meghaladhatja. Abban az esetben, ha az Önnek szállított e.b. fusselastíc talpbetét – a gondos csomagolás és szakszerű kezelés ellenére – sérülten érkezne, ingyenesen küldünk helyette egy másikat. Ilyen csere esetén az új talpbetétre új garanciális idő vonatkozik! A talpbetét nem szakszerű használata miatt bekövetkező sérülések esetében a garancia nem érvényesíthető!*

## **Személyes vevőszám**

*Kérjük, a csomagoláson szereplő vevőszámot gondosan őrizze meg, mert utánrendelés, információkérés vagy garanciális ügyintézés esetén szükség lesz a vevőszám megadására.*

 **fusselastíc**

[www.fusselastíc.hu](http://www.fusselastíc.hu)

[info@fusselastíc.hu](mailto:info@fusselastíc.hu)

+36 20 476 1818